

－ 医療機器の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。


参考 2-6

適正使用に関するお知らせ

グローションカテーテル (NXT・シングルルーメンPICC)

スタイレットの抜去に関する注意事項

カテーテルの長さを調整する際、カテーテルとスタイレットを一緒に切断することがないようにご注意ください。

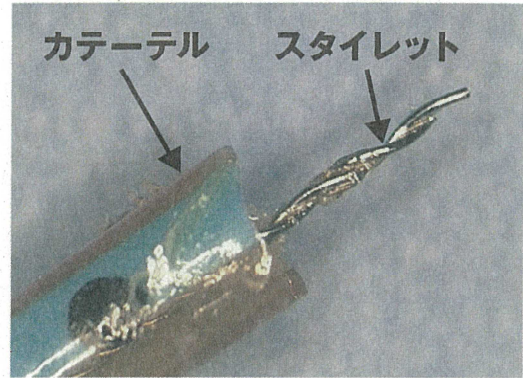


切断された事例

〈スタイレットの抜去に関する注意事項〉

カテーテル内にあらかじめ装着されたスタイレットは、カテーテルコネクタと接続する前に、必ずカテーテルから取り除いてください。

※スタイレットを残したまま接続して留置すると、カテーテルからスタイレットが飛び出し、血管穿孔及び臓器の損傷を引き起こすおそれがあります。

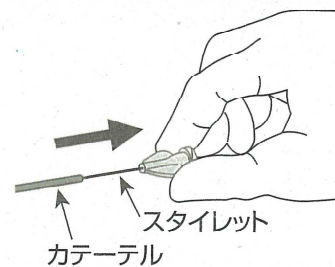


また、スタイレットの抜き忘れを防止するため、スタイレットに付いているタグを下記のとおり変更しました。

変更前



変更後

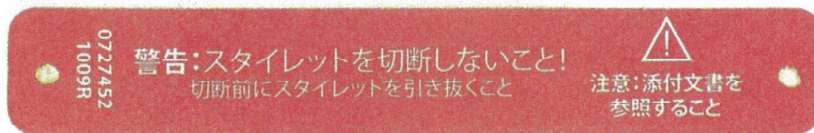

Bard、バード、Groshong、グローションは、C. R. Bard社の登録商標です。本書の著作権はC. R. Bard社が保有しています。

〈問い合わせ先〉 株式会社 メディコン 品質保証本部
 大阪市中央区平野町2丁目5-8 平野町センチュリービル
 電話 06-6203-6560 FAX 06-6203-6816