

家庭用ハンディーマッサージ器の適正使用のお願い(注意喚起)

弊社が昭和58年から平成15年まで販売しました家庭用ハンディーマッサージ器の使用上におきまして、布カバーを切り取られた跡がある状態で使用し、むき出しになった内部の駆動部に利用者が着用していたマフラーの一部が巻き込まれ死亡するという事故が発生しました。

亡くなられた方とご遺族の皆様に対しまして心より深くお悔やみを申し上げます。

弊社としましては、製品取扱説明書において注意を喚起してまいりましたが、改めましてホームページ等を通じてご愛用者の皆様に「布カバーを切り取ったり、破れた状態での使用は非常に危険である」ことを重ねてお知らせいたします。

また、より多くの方々に適正な使用方法についてお知らせしたく、下記の内容にて注意喚起をお願いすることとした次第です。

ご理解、ご指導を賜りますようお願いいたします。

記

1) 対象製品

もみ太くん MK - 1

ハンディーマッサージャー GM - 2 (愛称: もみ太くん)

注: 販売名は異なりますが同一製品です。

2) 発生事故の概要

平成22年1月25日 静岡県の70代の男性

3) 事故発生商品

ハンディーマッサージャー GM - 2


4) 事故原因

布カバーを切り取り、駆動部がむき出しの状態で使用されたため、首に二重に巻いていたマフラーの一部が巻き込み窒息したことにより死亡。

5) お客様に徹底をお願いしたい事項

< 警告 >

ついている布カバーを外したり、ハサミ等で切り取ったりする行為は絶対にしないでください。
また、布カバーが消耗等で少しでも破れたり、穴が開いたりした場合は、ただちに使用を中止し、フジ医療器お客様相談窓口にご連絡ください。
ご自身で修理・改造を行うことは危険ですので絶対おやめください。

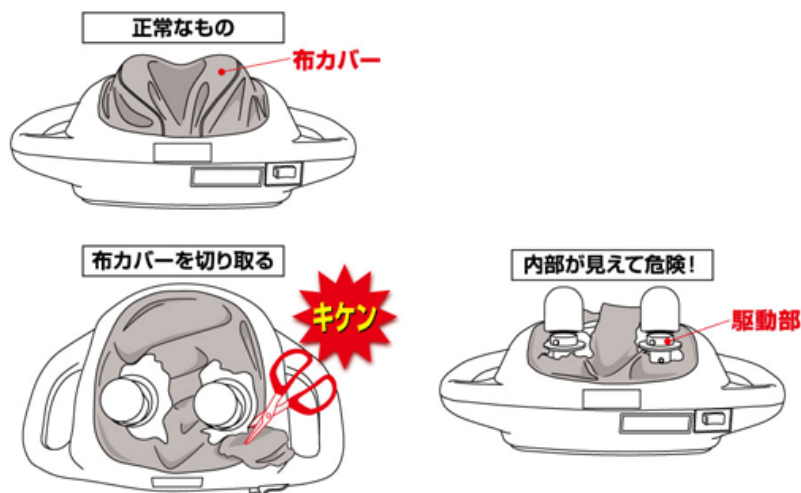

6) 販売台数、対象期間

もみ太くん MK - 1 昭和58年5月から平成7年8月 約20万台
ハンディーマッサージャー GM - 2 平成7年4月から平成15年8月 約11万台

7) 販売場所

全国の百貨店、スーパー等の催事場、及び取引先展示会、通信販売

8) 注意喚起の方法

報道機関に対してニュースリリース。
弊社ホームページに注意喚起のお知らせ。
弊社全製品の修理を実施した際に注意喚起の案内。

9) 現在製造中の類似機種

製造しておりません。

添付資料

ハンディーマッサージャー GM - 2 取扱説明書抜粋

参考：会社概要

社名：株式会社 フジ医療器
住所：大阪市中央区農人橋1丁目1番22号 大江ビル14階
代表者：木原 定男
事業内容：医療機器の製造販売、製造、健康・美容機器の販売
資本金：15億6000万円
創業：昭和29年4月

<お客様からのお問い合わせ先>

株式会社フジ医療器 お客様相談窓口
TEL: 0120-027-612 FAX:06-6644-9103
受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分
但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。
FAXでの受付は24時間行っておりますが、
お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

<報道関係者の お問い合わせ先>

株式会社フジ医療器 経営企画室 TEL: 06-4793-0645
担当：岩井 宏之
受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分

以上

ハンディーマッサージャー GM-2 取扱説明書抜粋

注意

ひじ・ひざ・頭部などの骨・関節部には使用しないでください。

ケガをしたり、体調不良をおこすことがあります。



禁止

使用時間は1回15分以内にしてください。

長時間の連続使用は、筋肉や神経を傷める逆効果をまねくことがあります。



15分以内

スイッチを入れて動かしてから、マッサージしたい箇所当ててください。

体に当ててから急に動かすと、ケガの原因になることがあります。



確認

お願い ●同一箇所への使用は5分以内に、1日の使用は30分以内にしてください。

使用中に身体に異常を感じたとき（気分が悪くなるなど）は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。



使用中止

本体の上に立っての使用はしないでください。

事故や故障の原因になります。



禁止

落としたり、踏みんだり等の強い衝撃を与えないでください。

ケガや故障の原因になります。



禁止

使用中は眠らないでください。

無意識での使用は、ケガや体調不良の原因になります。



禁止

治療目的以外に使用しないでください。

事故や故障の原因になります。



禁止

布団の中で使用する等、通風の悪い状態にしないでください。

火災等の事故や故障の原因になります。



禁止

他の治療器と同時に使用しないでください。



禁止

布カバーが破れたり、外れた状態では使用しないでください。

ケガや感電の原因になります。



禁止

各部の名称



効能・効果

あんま代用
 疲労軽減
 血行をよくする
 筋肉の疲れをとる
 腰痛のこりをほくす
 肩凝り・筋肉痛の痛みを軽減

ご使用方法

①本体の電源コードの差し込みプラグをご家庭のコンセントに差し込みます。



②電源スイッチを「もみ上げ」が「もみ下げ」にすれば作動します。

③取っ手を持つなどして、マッサージしたい箇所当ててください。

お願い 痛くない、「気持ちいい」強さでご使用ください。

④ご使用後は必ず電源スイッチを「切」にしてから、コンセントより差し込みプラグを抜いてください。



注意

スイッチを入れて動かしてから、マッサージしたい箇所当ててください。

体に当ててから急に動かすと、ケガの原因になることがあります。



確認

注意

使用後は本体の電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

故障劣化による感電や漏電火災の原因になることがあります。



確認



プラグを抜く