

オプチクリック®をご使用の患者様へ

オプチクリックは、「JIS T 3226-2 A 型」表示の注射針とご使用いただけます。

ただし、「A 型」表示のないペンニードル®30G、ペンニードル®32G テーパーとは適合性が認められなかったため、オプチクリックと組み合わせてご使用いただくことはできません。

オプチクリックにペンニードル®をご使用の際は、内袋の表面又は裏面に、「JIS T 3226-2 A 型」の表示があることをご確認ください。もしくは、針ケースの保護シールの「NIPRO」の表示をご確認ください。

写真提供 ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

ペンニードル® 30G 8mm*		ペンニードル® 32G テーパー*	
オプチクリックに 使用できません		オプチクリックに 使用できます	
内袋 表面	内袋 裏面	内袋 表面	内袋 裏面
保護シール		保護シール	
オプチクリックに 使用できません		オプチクリックに 使用できます	
内袋 表面	内袋 裏面	内袋 表面	内袋 裏面
保護シール		保護シール	

*JIS A 型規格のペンニードル®30G 8mm は2008年3月に、ペンニードル®32G テーパーは2007年8月にオプチクリックに装着可能なように形状変更され、以降「JIS T 3226-2 A 型」表示がされました。

サノフィ・アベンティス社 糖尿病関連医療機器サポートダイヤル

操作方法を24時間365日サポート

オプチコール24
0120-49-7010

サノフィ・アベンティス株式会社

2008年11月作成