

(事例1) 複数患者に使用不可である採血用穿刺器具(針の周辺(キャップ)がディスポーザブルタイプでない製品)を、複数の患者に使用し、感染症の発生が疑われた。

2 針の周辺部分がディスポーザブルタイプでない製品の注意事項

【禁忌・禁止】

- 患者個人の使用に限り、複数の患者に使用しないこと。[付着した患者の血液等を介した感染症の原因となる可能性がある。]
- 分解や改造を行ったり、採血以外の目的で使用しないこと。
- ランセットは再使用禁止。毎回新しいものを使用すること。

当該製品の添付文書の【禁忌・禁止】欄には、左のような注意書きが記載されています。製品の添付文書を必ず確認してから使用すること。

複数患者使用不可

氏名


針の周辺部分(キャップ)がディスポーザブルタイプでない製品(いわゆる、針のみディスポーザブルタイプの製品)には、本体にも左のシールが貼ってあるので、絶対に複数の患者に使い回ししないこと。この製品は、「個人使用」に限定されます。

いわゆる、針のみディスポーザブルタイプの製品

(株)アークレイファクトリー
マルチランセットS




アボットジャパン(株)
イーザータッチ

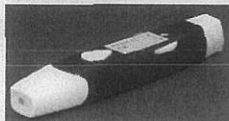

アボットジャパン(株)
ランセットデバイス



ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)
ワンタッチウルトラソフト

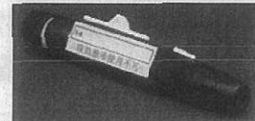

ロシュ・ダイアグノスティクス(株)
ソフトクリックス(穿刺器)



ロシュ・ダイアグノスティクス(株)
ソフトクリックスプラス



ロシュ・ダイアグノスティクス(株)
ソフトクリックスミニ



ロシュ・ダイアグノスティクス(株)
マルチクリックス



日本ベクトン・ディッキンソン(株)
エースレット



バイエル薬品(株)
マイクロレット



バイエル薬品(株)
マイクロレットチョイス



(株)旭ボリスライダー
簡単測糖Gレット



ニプロ(株)
ニプロフリースタイルライトショット
フリースタイルキッセイ穿刺器



ニプロ(株)
ニプロフリースタイルライトショットフラッシュ
フリースタイルフラッシュキッセイ穿刺器



ニプロ(株)
ニプロフリースタイルライトショットフリーダム
フリースタイルフリーダムキッセイ穿刺器



ニプロ(株)
ラクレット




テラメックス(株)
オートランセットII



平成17年3月販売中止

ノボルディスクファーマ(株)
ノボペンレットプラス

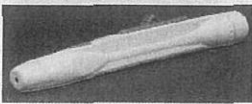

平成17年3月販売中止

複数患者への使用禁止理由は、針を交換しても針の周辺部分(キャップ)やそのキャップの内側に付着する血液からの感染の危険性が否定できないからです!!



注) 上記の写真は、現時点においてPMDAが各企業の協力を得て入手可能であった製品の一覧です。