



3 その他のタイプの穿刺器具について

器具全体が Disposable タイプの製品


ロシュ・ダイアグノスティクス(株)
セーフティプロラス

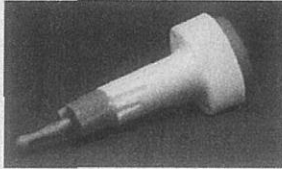


日本ベクトン・ディッキンソン(株)
BDセーフティランセット

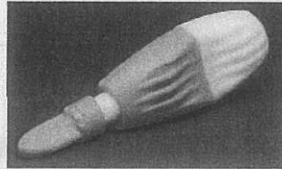

日本ベクトン・ディッキンソン(株)
BDジニーランセット

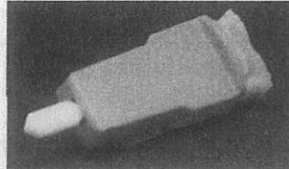

日本ベクトン・ディッキンソン(株)
マイクロティナ・セーフティ
フロー・ランセット

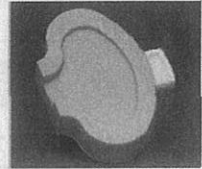

- 上記の製品は、1度発射すると2度と針を発射できない構造になっている、針の再使用防止製品です。

針の周辺部分が Disposable タイプの製品

写真1

ロシュ・ダイアグノスティクス(株)
ソフトクリックスプロ



テルモ(株)
メディセーフファインタッチプロ



パナソニック四国エレクトロニクス(株)
ジェントレット



(株)アークレイファクトリー
ナチュラルレットデバイス



- 上記写真1の製品は、1度発射すると2度と針を発射できない構造になっている、針の再使用防止製品です。

写真2

バイエル薬品(株)
ピンレット



ミサワ医科工業(株)
フィンガービット・フィンガーレット



テルモ(株)
メディセーフファインタッチ



- 上記写真2の製品は、針と針の周辺ごと交換するタイプですが、同じ針を何度も使用できてしまう構造なので、必ず1回毎に交換することを忘れないで下さい。使用後は、すぐに取り外して廃棄し、針を付けたまま放置しないで下さい。

医療機関をはじめ、介護老人保健施設、健康教室等の保健事業の場など、様々な場面で注意が必要です。
使用対象者に応じ、適切な器具の選択をお願いします!!

