

お客様各位



株式会社 ジェイ・エム・エス

アイフューザー プラス ご使用に際して

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素はジェイ・エム・エス製品に格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、弊社輸液ポンプ「アイフューザー プラス」にて輸液セットカセット部回転異常の報告をいただきましたので下記のとおりご案内申し上げます。

また、対象機器等ご不明な点がございましたら弊社営業担当者までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

なお、今後とも弊社製品のご愛顧の程、よろしくようお願い申し上げます。

謹白

記

■ 対象製品

- 一般的名称:汎用輸液ポンプ(患者管理無痛法用輸液ポンプ)
- 販売名称:アイフューザー プラス
- プログラムVer. 1. 43

■ 使用状況等



- 本品の運転開始直後、輸液セットのカセット部の回転異常が発生いたしました。該当装置を調査いたしましたところ、モータの回転を制御する電子部品が破損していることが分かりました。なお、電子部品の破損の原因は、落下等による衝撃と考えられました。

■ 対応について

- 現在、本事象への対応のため、プログラム修正を実施しております。修正プログラムが完成するまでの間、次の手順によりご対応いただきますようお願い申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

■ ご使用に際して

- ご使用に際しましては、モータのセルフチェックのため、輸液セットのカセット部を装着する前に電源を入れてください。

【添付文書記載の方法】	【変更後】
<p data-bbox="180 506 549 539">カセット装着後に電源を入れる</p>  <p data-bbox="172 891 470 918">【操作方法又は使用方法等】</p> <p data-bbox="172 936 699 1064">①輸液セットのカセット部を本品に装着します。 ②本品の ON/ストップ/OFF キーを押して電源を ON にします。</p>	<p data-bbox="927 506 1295 539">カセット装着前に電源を入れる</p>  <p data-bbox="861 936 1385 1064">①本品の ON/ストップ/OFF キーを押して電源を ON にします。 ②輸液セットのカセット部を本品に装着します。</p>


<注意>

セルフチェックを行い電子部品の破損がある場合は『エラー27』が表示されます。その際は、ご使用を直ちに中止して点検をご依頼願います。

- カセット装着後に電源を入れた場合、モータのセルフチェックは行われません。
- ポンプの電源を ON にした後、セルフチェックが完了したことを必ず確認してください。
- 本品が落下した場合、または硬いものにぶつける等本品に衝撃が加わった場合、もしくは加わったと思われる場合は、ご使用を直ちに中止して点検をご依頼願います。

■ プログラムVerの確認方法

- 本品の電源を ON にした際、セルフチェックが開始される前に、画面右下にプログラムVer.が表示されます。

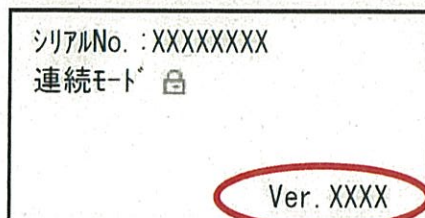

以上



<http://www.jms.cc>

製造販売元
株式会社ジェイ・エム・エス

●お問い合わせ先 第1営業部 TEL. 03-6404-0601
〒140-0013 東京都品川区南大井1丁目13番5号新南大井ビル