

呼吸モニター「ベビーセンス」をご使用中の皆様へ

ご使用上の注意について

ベビーセンスは、「電源入切」と「アラーム停止」を同じボタンで操作します。

アラームを止める操作によって、電源が切れますので注意してください。

ご使用の際は、必ず操作ボタンを押し、電源を入れて、緑の運動表示ランプが点滅することをご確認ください。

電源が切れた状態での使用を防ぐために、シールを作成しましたので、
以下のとおり、製品本体への貼付をお願いいたします。

<p>貼付位置</p>  <p>コントロールユニット（前面）</p>	<p>シール見本</p>  <p>矢印の位置に、文字やランプが隠れないように貼ってください。</p> <p>シールの枚数は、現在ご使用中の台数分をお送りいたしますが、不足や追加等がございましたら、ご連絡ください。</p>
---	--

製造販売元 JCR ファーマ株式会社

販売元 株式会社ファミリーヘルスレンタル

フリーダイヤル TEL 0120-20-4566

FAX 0120-40-4577