


Servo*i* Servos クイック操作


FUKUDA
DENSHI

13 アラーム

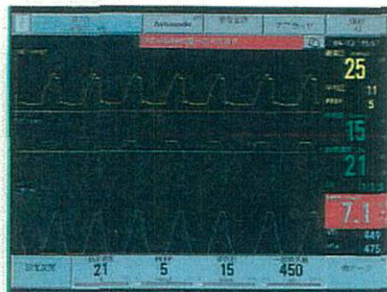


最重要アラームはメッセージエリアと測定値部分が赤色、重要アラームは黄色に点滅します。消音する時は、アラーム消音キーを押します。

14 アラーム消音

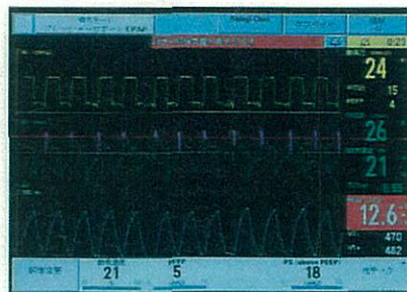


アラーム消音キーを押してアラーム音を2分間消せます。2分間のバックカウントが始まります。

15 アラーム事前消音

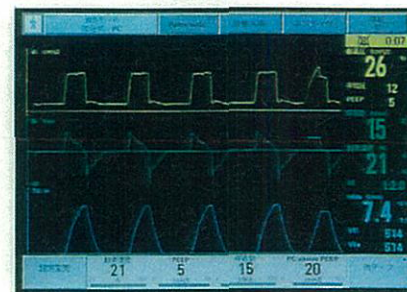


アラーム消音キーを長めに押しするとアラーム事前消音が2分間できます。再度長めに押しすると解除します。

16 アラーム履歴

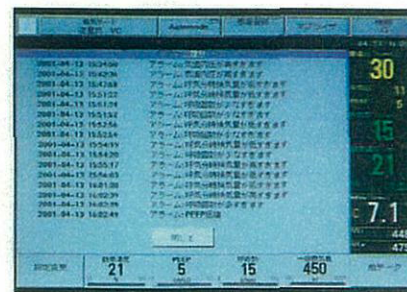

【メニュー】キーより最新のアラーム履歴が確認できます。最大16件で、新しいデータが入って来ると、古いデータから無くなります。

17 トレンド

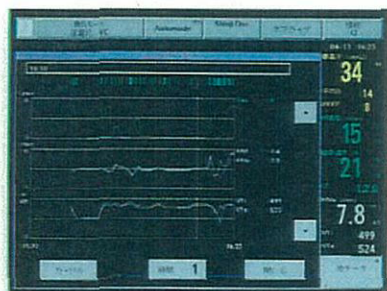


【トレンド】キーにて24時間分のトレンドとイベント（設定変更、アラーム、アラーム消音等）が確認できます。

18 ネブライザ (Servo*i* のみのオプション機能)



【ネブライザ】キーをタッチしますと、ネブライザ時間を選択（最長30分）ができますので、時間選択後【決定】キーにてスタートします。

19 O₂換気

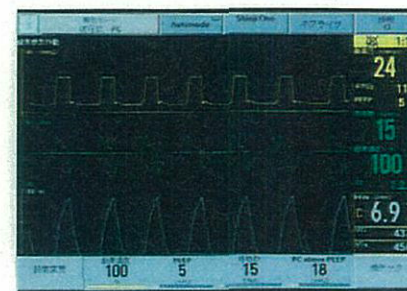


【O₂換気】キーにて100%酸素を1分間供給します。（同時に2分間事前消音も起動します。）再度押しすると中止して以前の設定濃度に戻ります。

20 バックアップ換気




サポートモード時、設定した無呼吸時間になりますと、アラーム起動と同時にバックアップ換気になります。画面に他のモードに変更するか、サポートモードに戻るか聞いてきますので選択します。

21 スタンバイ

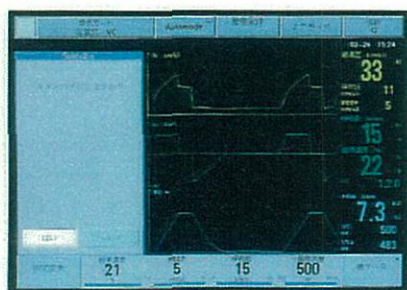

スタンバイ画面に戻す時は左下のスタート時に押したスイッチを再度押しすと、画面にて「スタンバイにしますか?」と聞いてきますので【はい】を選択してください。

22 電源OFF

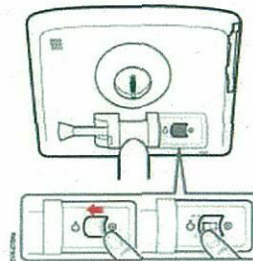

その後、電源を切る時は裏面のメイン電源を切ります。
注意
メイン電源を切るとモード・設定項目がデフォルトにもどります。



輸入発売元
フクダ電子株式会社®
本社 〒113-8483 東京都文京区本郷3-39-4
(03)3815-2121(代)

S3054UK Mat.No.042460Ⓚ