


人工呼吸器 Servoⁱ/Servos

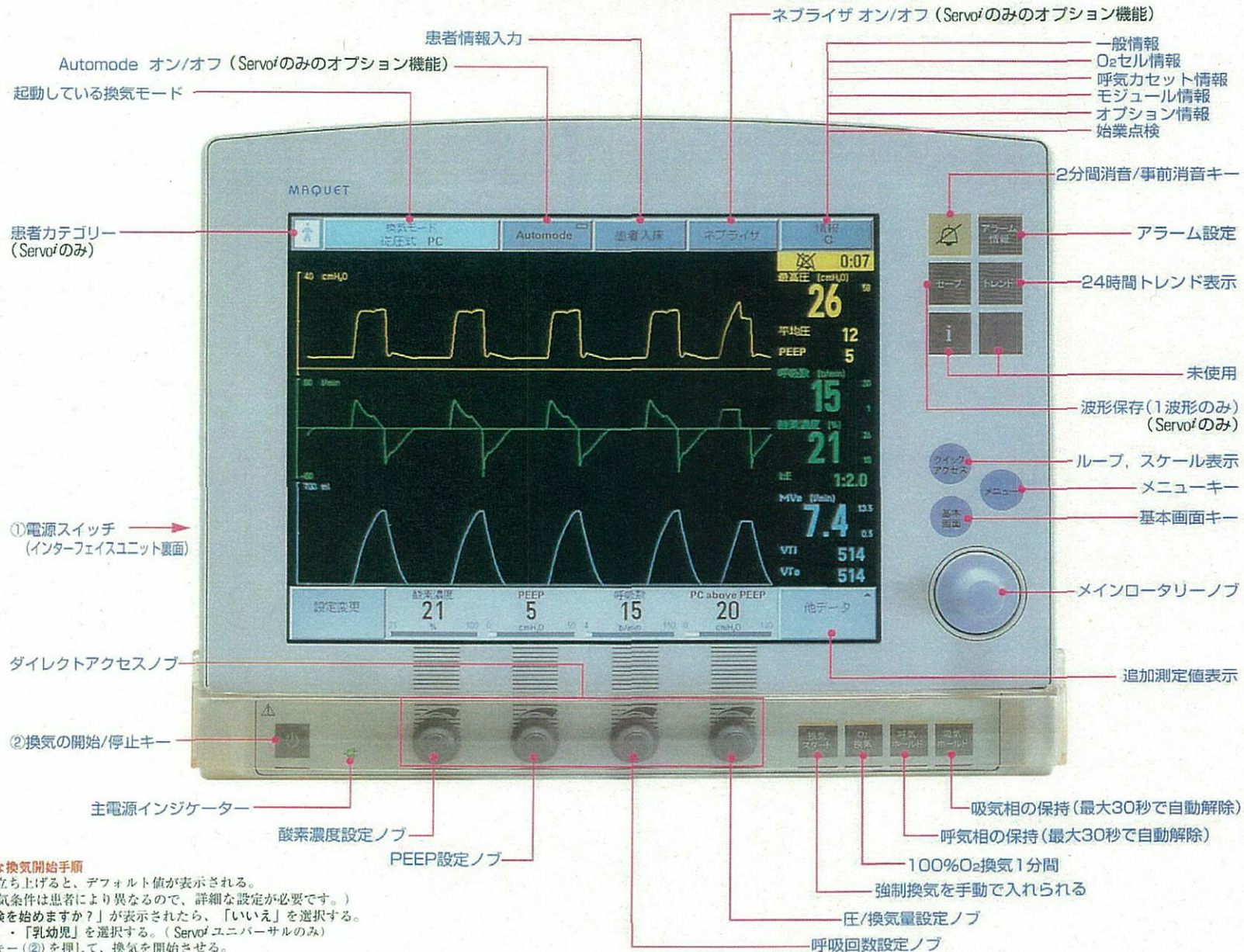

緊急使用時の標準的な換気開始手順

- ・本体の電源(①)を立ち上げると、デフォルト値が表示される。(換気量・圧等の換気条件は患者により異なるので、詳細な設定が必要です。)
- ・画面上に「始業点検を始めますか?」が表示されたら、「いいえ」を選択する。
- ・患者により「成人」・「乳幼児」を選択する。(Servoⁱユニバーサルのみ)
- ・左下のスタンバイキー(②)を押して、換気を開始させる。