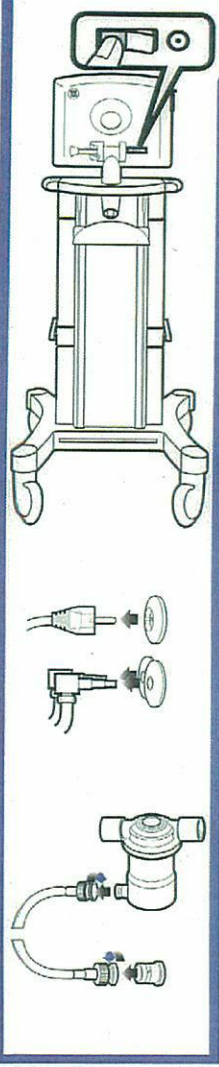
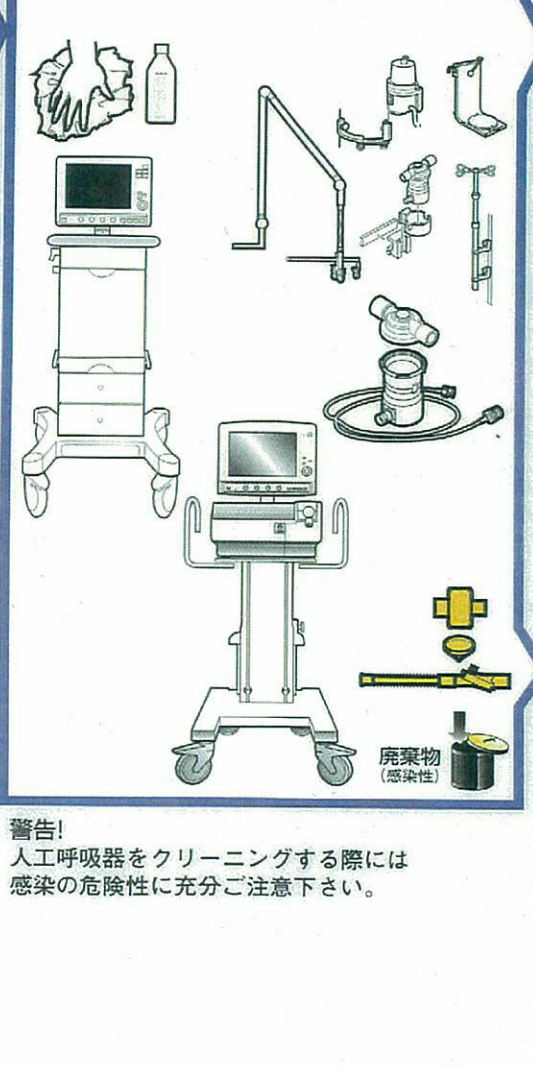


▲ 詳細は取扱説明書をご覧ください。

準備	拭き取り/廃棄	消毒手順	滅菌手順	乾燥	始業点検
	 <p>警告! 人工呼吸器をクリーニングする際には感染の危険性に充分ご注意ください。</p>	<p>患者回路部品</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 すすぎ 2 消毒剤 1時間(アルコール) 3 すすぎ <p>ネブライザ部品</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 グルタルアルデヒド 1時間 2 蒸留水 	<p>患者回路部品 オートクレーブ</p> <p>134°C (273°F) で3分</p> <p>※呼吸カセットは最大134°Cまでです。</p> <p>121°C (250°F) で15分</p> <p>ネブライザ部品 オートクレーブ</p> <p>134°C (273°F) で3分</p> <p>※ベシエントユニットはオートクレーブにかけられません。</p>	<p>乾燥</p> <p>※消毒と滅菌の後は必ず部品を乾かしてから使用して下さい。</p>	<p>始業点検</p> 