

NCB インプラント開封の注意点

Zimmer Trauma

1. 外箱の開封方法



外箱の開封シールを剥がし、中のビニールパッケージを取出します。

→ビニールパッケージは3重包装です。



保護
パッケージ




注意
シールが貼られていない製品もあります。



2.ハサミで保護パッケージを切る

中の包装に傷をつけぬよう 切り取り指示線に合わせてハサミで開封して下さい。

中は滅菌されていて清潔ですが、ハサミを用いることで不潔になります。

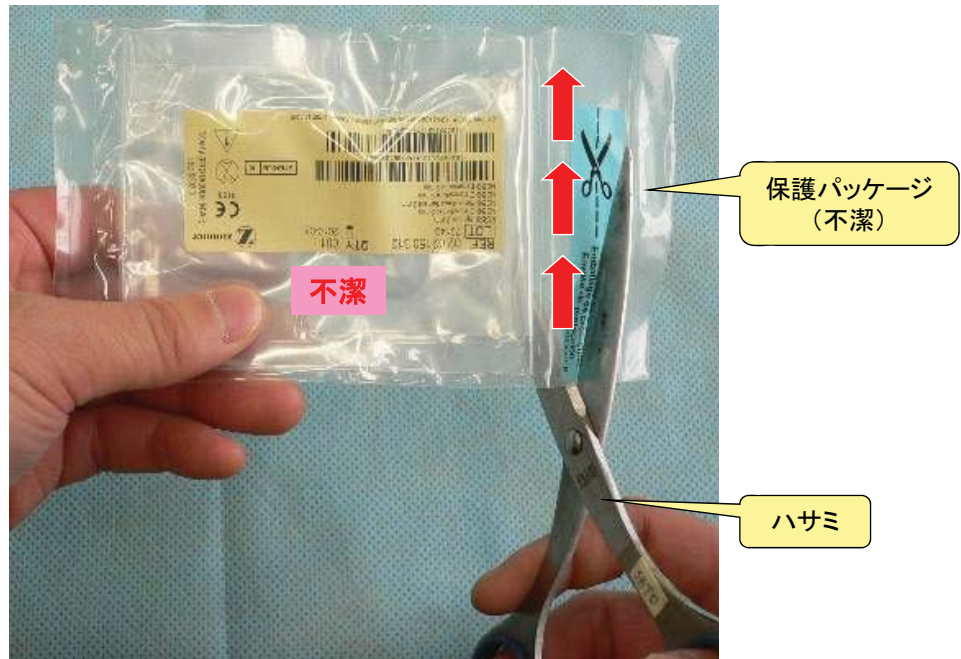

3.保護パッケージから指でつまみ出す



4.清潔なコッヘルなどで取出す

3重目のパッケージは清潔です。

清潔領域の看護師さんが清潔なコッヘルなどで取出して下さい。



3重包装は、3重包装の状態で滅菌をかけています。

保護パッケージを不潔なはさみなどで切った場合は、2重目の外袋も不潔になってしまいますのでご注意ください。

必ず**最終包装(3重目)のみを清潔領域**に取り出すよう
ご注意ください。

3重包装の外側

