

家庭用電気マッサージ器の適正使用に関する  
情報提供の実施について



薬食安発第1216001号  
平成20年12月16日

社団法人日本ホームヘルス機器協会会長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

### 家庭用電気マッサージ器の適正使用に関する情報提供の実施について

家庭用電気マッサージ器（家庭用の電気マッサージ器との組み合わせ医療機器を含む。以下同じ。）については、添付文書又は取扱い説明書における注意事項に従い、正しく使用する必要があります。

しかしながら、正しく使用していれば、防げた可能性のある死亡を含む重大な健康被害の生じた事故に関する報告がなされており、厚生労働省としても家庭用電気マッサージ器の適正使用に関する注意喚起と事故事例の公表をホームページ (<http://www.mhlw.go.jp>) 等で行ったところです。

ついては、貴会におかれても、同様の事故を防止するため、家庭用電気マッサージ器の適正使用に関する情報について、誤った使用方法による健康被害のリスクを含め、広く消費者に向けて提供するよう願います。

## 家庭用ローラー式電気マッサージ器の適正使用のお願い（注意喚起）

弊社が昭和61年に製造いたしました、家庭用ローラー式電気マッサージ器「アルビシェイプアップローラー」を、布カバーを装着しない状態で使用して、衣服を巻き込み死亡する事故が発生いたしました。

亡くなられた方のご遺族の皆様に対しまして心より深くお悔やみを申し上げます。

弊社としては、社告やホームページ等を通じて、全国のご愛用者の皆様に、布カバーを外したり、破れた状態での使用は大変危険なため、絶対にされないよう、お知らせいたします。

しかしながら、販売台数も多く、販売会社の倒産等で販売先を特定することは極めて難しく、本日、下記の内容について記者会見を行い、注意喚起をお願いすることとした次第でございます。

弊社では今後とも、お客様により安全でより喜ばれる商品を提供できるよう一層の努力をしております。これからもご理解、ご指導を賜りますようお願いいたします。

### 記

#### 1) 対象商品名

(商品名)	(型式)
① アルビシェイプアップローラー	
② シェイプアップローラーⅡ	SR-5118

#### 2) 発生事故の概要

- ・平成20年12月2日 北海道で50代の女性
- ・平成15年 香川県で60代の女性
- ・平成11年 栃木県で40代の女性

#### 3) 事故発生商品

3件ともアルビシェイプアップローラー

#### 4) 事故原因

3件ともカバーのない状態で使用したため衣服を巻き込み窒息したことにより死亡

#### 5) お客様に徹底をお願いしたい事項

**布カバーを外したり、破れた状態での使用は大変危険なため、絶対にしないでください。**

本製品の取扱説明書で安全のためカバーをはずして使用しないよう明記してあります。

#### 6) 本製品の構造

本製品はローラーの回転によってマッサージの効果を出す構造になっているため、カバーによってローラーに直接触れないようにして安全性を確保してあります。そのためカバーの装着は絶対条件です。

7) 販売期間、販売台数

- ①アルビシエイプアップローラー 昭和 58 年 8 月から平成 2 年 約 4 2 万台
- ②シェイプアップローラーⅡ 昭和 63 年 7 月から平成 8 年 約 3 6 万台

8) 販売場所

全国の百貨店、スーパー等の催事場での販売

9) 商品の特定方法

- ①アルビシエイプアップローラー 商品本体側面に商品名を記載したラベルを貼付
- ②シェイプアップローラーⅡ 商品本体裏面に商品名を記載したラベルを貼付

10) 安全装置（過負荷保護装置）

- ①、② ともになし

11) 注意喚起の方法

- ①新聞に社告を掲載して全国に注意喚起いたします。
- ②弊社への修理依頼やカバーの注文を頂いたお客様に注意喚起の案内を送ります。
- ③弊社のホームページに注意喚起のお知らせを掲載します。
- ④社団法人日本ホームヘルス機器協会さまに注意喚起のお願いをします。

12) 現在製造中の類似機種

- ①ロースマルチリフレクサー
  - ②プチローラー
- ともに過負荷保護装置とカバー未装着停止装置が付いております。

添付資料

- ①対象商品の確認箇所
- ②アルビシエイプアップローラー取扱説明書抜粋
- ③シェイプアップローラーⅡ取扱説明書抜粋

参考：会社概要


社 名 : 株式会社の場電機製作所  
住 所 : 埼玉県川越市的場 2 6 2 7 番地 5  
代表者 : 廣 澤 隆 興 (トヨタ 専務)  
事業内容 : 小型モータ、健康機器、モータ応用機器等の製造  
資本金 : 7, 9 7 2 万円  
創 業 : 昭和 3 7 年 3 月

<連絡先>


株式会社の場電機製作所 お客様相談室  
住 所 〒350-1101 埼玉県川越市的場 2 6 2 7 番地 5  
電話番号 0 4 9 - 2 3 1 - 2 2 5 5  
(受付時間) 平日 9 時から 17 時まで (土日・祝日を除く)

# 販売名確認箇所

## ① アルビシェイプアップローラー

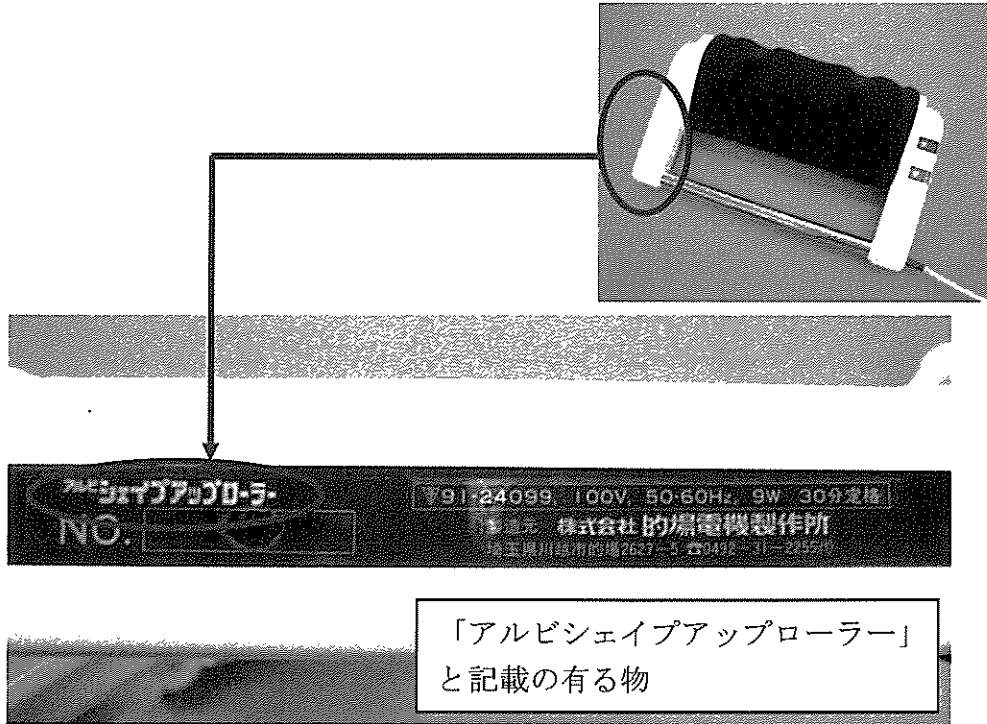

## ② シェイプアップローラーⅡ

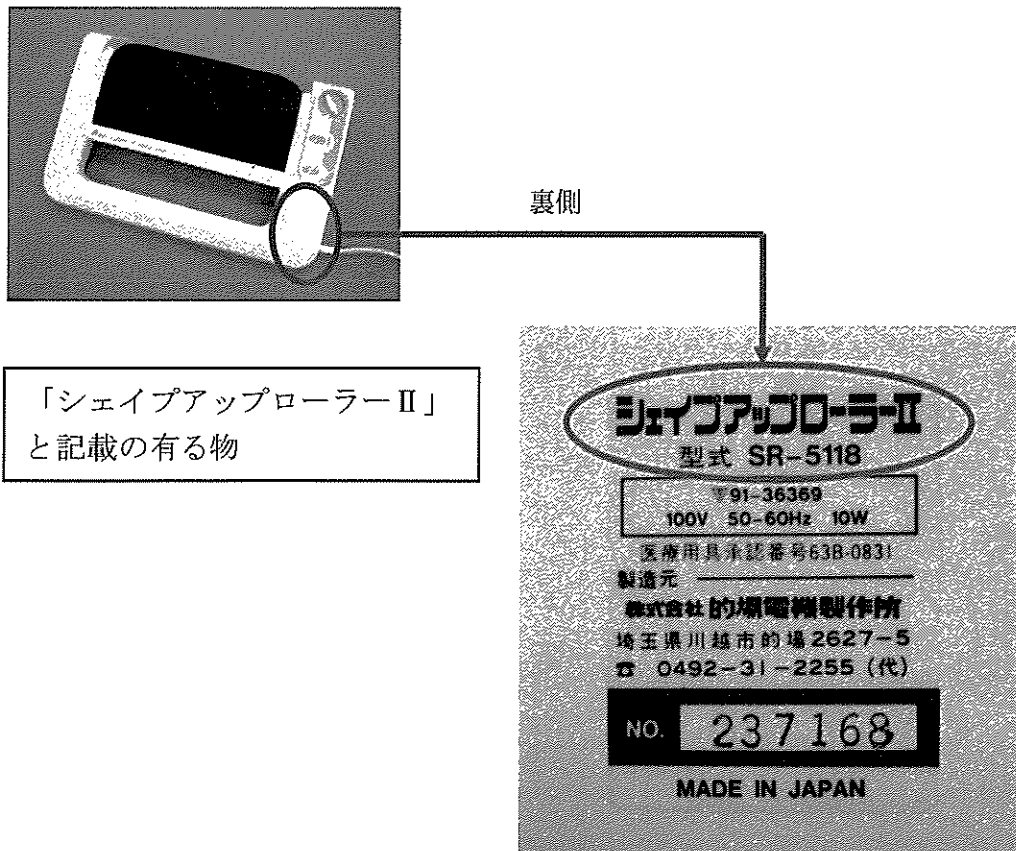

# アルビシエイプアップロープアッパー取扱い説明書より抜粋

表紙

## アルビシエイプアップロープ


ご愛用  
しおり



※必ずよく読んでお読みください。ご使用前に  
このしおりをお読みください。また、お読み  
になる前に必ずお読みください。

### 使用上の注意


- 安全のためカバーをはずしたまままでご  
使用にならないでください。また、回  
転しているローラーの間に指や物品等  
を入れないでください。

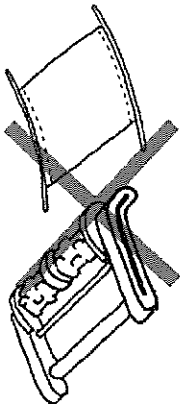

使用上の注意より抜粋

### 仕様・定格

■各部の名称

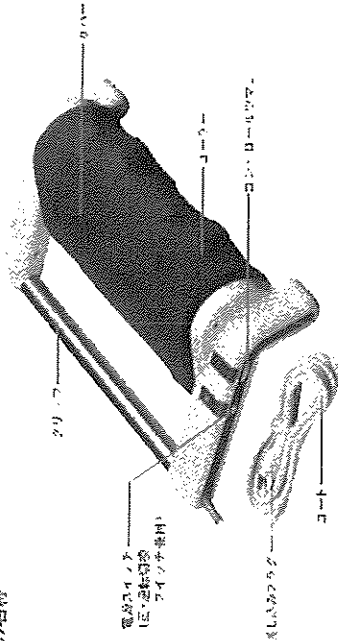

### ■定格・仕様

定格電圧	AC 100V 50/60Hz
消費電力	3W
定格時間	30分
ローラーの回転数の コントロール範囲	1/300分～1/4500分
ローラーの回転方向	前方及び後方への両向き
ローラーの枚数	24個

※図は、一例です。仕様・電圧等については、必ずご確認ください。


# シェイプアップローラーII取扱説明書より抜粋

## 表紙

### 取扱説明書

**保証書付**


ご使用前に必ずお読みください。  
 この度は当社製品をお買上げいただき、  
 誠にありがとうございます。また、  
 ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読み  
 合わせ、正しくお使いください。

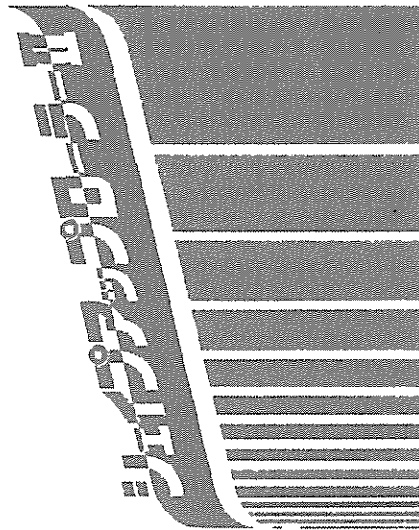

株式会社  
**DESTICARE**

## 使用上のご注意


- 安全のためカバーをはずしたままでご使用にならないでください。また、回転しているローラーの間に指や物品等を入れないでください。

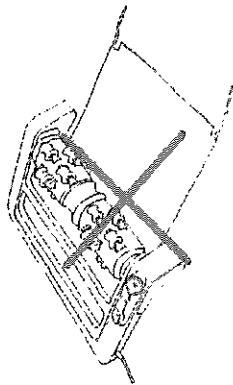

## 使用上の注意より抜粋

## 仕様・定格

### ■各部の名称

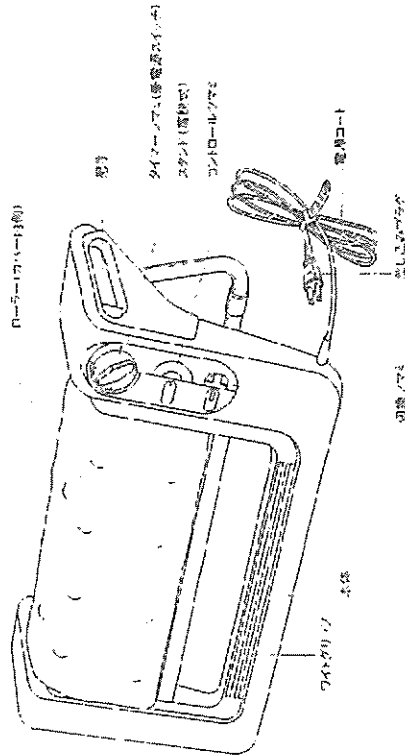

### ■定格・仕様

- 電源 定格電圧：100V 50/60Hz
- 消費電力：10W
- 材質：ABS樹脂
- 寸法：幅：200mm 高さ：120mm
- タイマー：タイマー機能：なし
- ローラー：ローラー材質：EVA 直径：45mm 回転数：約100回/分
- ローラーの径：24mm
- 保証期間：1年間
- 取扱説明書：日本語

- 製品名：シェイプアップローラーII(電源通電時専用)
- 型番：SR-5118
- 寸法：幅：200mm 高さ：120mm
- 重量：約0.8kg
- 生産国：中国
- 販売店：株式会社 DESTICARE
- お問い合わせ先：03-5561-1111
- お問い合わせ先：03-5561-1111
- お問い合わせ先：03-5561-1111

※仕様・価格等は、無断で変更される場合があります。

## 家庭用電気マッサージ器の適正使用のお願い


社団法人 日本ホームヘルス機器協会

家庭用電気マッサージ器は、取扱説明書のとおり使用していただくとともに、特に次の事項を守って正しくご使用ください。

1. 家庭用電気マッサージ器のカバー(布・革など)を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。  
また、本体カバー(布・革など)に破れがある場合は、使用を中止し、必ず修理に出してください。

※衣服や髪が巻き込まれることによる死亡や事故が報告されております。

(主な種類)

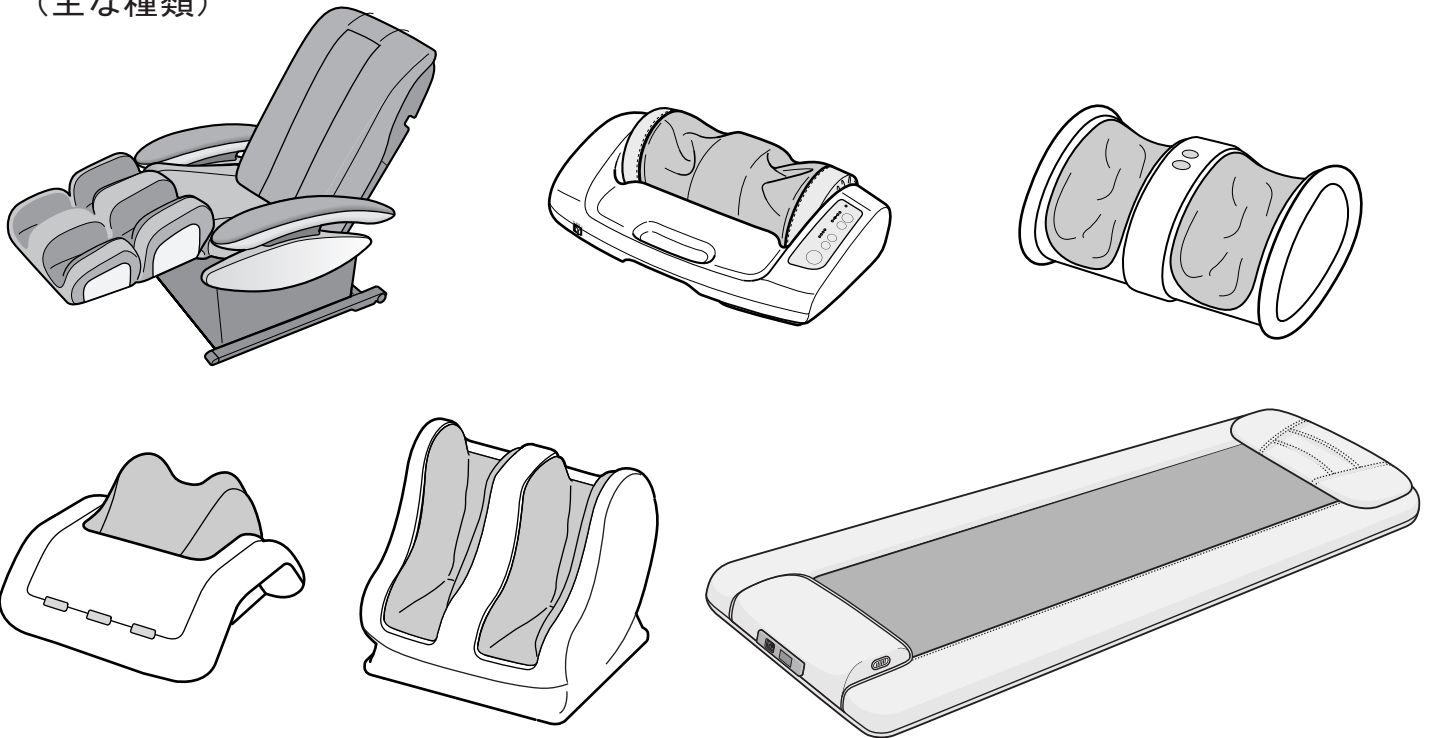

2. お子様を家庭用電気マッサージ器で遊ばせないでください。  
また、使用後は安全のために、電源スイッチを「切」にしてください。

※転倒や本体に挟まることによる事故等が報告されております。

(例)

