

インジケータの表示などについて

(株) フィリップスエレクトロニクスジャパン



ハートスタートHS1



ハートスタートFRx



ハートスタートFR2+



正常状態



[ランプ(緑)が
点滅している]

異常あり



[ランプ(緑)が
消灯している]

正常状態



[黒い砂時計マークが
点滅している]

異常あり



[赤い×マークが
点灯又は点滅している]

問い合わせ先: (株) フィリップスエレクトロニクスジャパン AEDコールセンター TEL 0120-802-337
<http://www.philips.co.jp/>

日本メドトロニック (株)



ライフパック500/500B

正常状態



[OKマークを
表示している]

異常あり



[マークやメッセージが
表示される]



ライフパックCR plus

正常状態



[OKマークを
表示している]


異常あり



[マークが
表示される]

問い合わせ先: 日本メドトロニック (株) ライフパックお客様センター TEL 0120-715-545
<http://www.medtronic-lifepak.com/>

日本光電工業 (株)

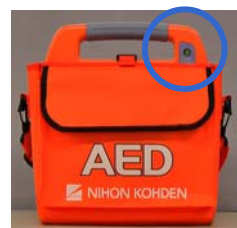

カルジオライフ
AED-9100 / 9110 / 9200




カルジオライフ
AED-9231



カルジオライフ
AED-1200

正常状態

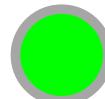

[緑を
表示している]

異常あり



[赤が
表示される]

問い合わせ先: 日本光電工業(株) AED保守受付センタ TEL 0120-233-821
<http://www.nihonkohden.co.jp/aed/>