株式会社 的場電機製作所

## 家庭用ローラー式電気マッサージ器の適正使用のお願い(注意喚起)

弊社が昭和61年に製造いたしました、家庭用ローラー式電気マッサージ器「アルビシェイプ アップローラー」を、布カバーを装着しない状態で使用して、衣服を巻込み死亡する事故が発生 いたしました。

亡くなられた方とご遺族の皆様に対しまして心より深くお悔やみを申し上げます。

弊社としては、社告やホームページ等を通じて、全国のご愛用者の皆様に、布カバーを外したり、破れた状態での使用は大変危険なため、絶対にされないよう、お知らせいたします。

平成20年12月にも、同様に布カバーを装着しない状態での事故が発生しております。

弊社では記者会見を通じて、報道関係の皆様のお力をお借りして広く「注意喚起」を行い、また一般社団法人日本ホームヘルス機器協会様にもお願いして「注意喚起」をするなどしてまいりました。

今回そうした声が届かず、痛ましい事故が起きました事は誠に残念なことであります。 これからも引き続き布カバーを外したり、破れた状態では絶対に使用されないよう、お知らせを してまいります。

今後とも、お客様により安全でより喜ばれる商品を提供できるよう一層の努力をしてまいりま す。ご理解、ご指導を賜りますようお願いいたします。

記

### 1) 発生事故の概要

- ・平成24年3月13日 愛知県で60代の女性死亡
- 事故発生商品:アルビシェイプアップローラー(昭和61年5月30日製造)
- ・ 事故原因: カバーのない状態で使用したため衣服を巻込み窒息したことにより死亡

#### 2) お客様に徹底をお願いしたい事項

弊社が製造販売する安全装置のない次の2製品について、以下の注意を徹底してください。

### 対象商品名

(商 品 名)

(型 式)

- ① アルビシェイプアップローラー
- ② シェイプアップローラー II

SR-5118

布カバーを外したり、破れた状態での使用は大変危険なため、 絶対にしないでください。

本製品の取扱説明書で安全のためカバーをはずして使用しないよう明記してあります。

### 3) 注意が必要な製品の情報

### ①製品の構造

本製品はローラーの回転によってマッサージの効果を出す構造になっているため、カバーによってローラーに直接触れないようにして安全性を確保してあります。そのためカバーの装着は絶対条件です。

### ②販売期間、販売台数

アルビシェイプアップローラー 昭和 58 年 8 月から平成 2 年 約 4 2 万台 シェイプアップローラー  $\Pi$  昭和 63 年 7 月から平成 8 年 約 3 6 万台

### ③販売場所

全国の百貨店、スーパー等の催事場での販売

### ④商品の特定方法(添付資料①参照)

アルビシェイプアップローラー 商品本体側面に商品名を記載したラベルを貼付シェイプアップローラー II 商品本体裏面に商品名を記載したラベルを貼付

### 4) 注意喚起の方法

- ①新聞に社告を掲載して全国に注意喚起いたします。
- ②弊社への修理依頼やカバーの注文を頂いたお客様に注意喚起の案内を送ります。
- ③弊社のホームページに引続き注意喚起のお知らせを掲載します。
- ④一般社団法人日本ホームヘルス機器協会様に注意喚起のお願いをします。

## (参考) 現在製造中の以下の類似機種については、全ての機種に過負荷保護装置とカバー未装着 停止装置が付いております。

- ①ロースーマルチリフレクサー
- ②プチローラー
- ③コンフォートウィン、コンフォートトップ、コンフォートローラ

### 添付資料

- ①対象商品の確認箇所
- ②アルビシェイプアップローラー取扱説明書抜粋
- ③シェイプアップローラーⅡ取扱説明書抜粋

### 会社概要

社 名 : 株式会社的場電機製作所

住 所 : 埼玉県川越市的場 2 6 2 7 番地 5 代表者 : 廣 澤 隆 興 (ヒロサワ タカオキ)

事業内容: 小型モータ、健康機器、モータ応用機器等の製造

資本金 : 7,972万円創 業 : 昭和37年3月

### <連絡先>

株式会社的場電機製作所 お客様相談室


住 所 〒350-1101 埼玉県川越市的場2627番地5

電話番号 049-231-2255


(受付時間)平日9時から17時まで(土日・祝日を除く)

# 販売名確認個所

## ①アルビシェイプアップローラー

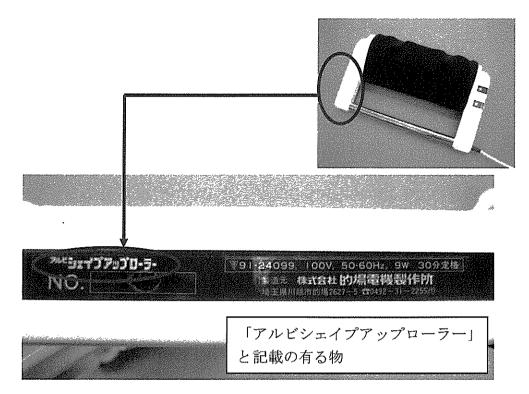

## ②シェイプアップローラー**Ⅱ**

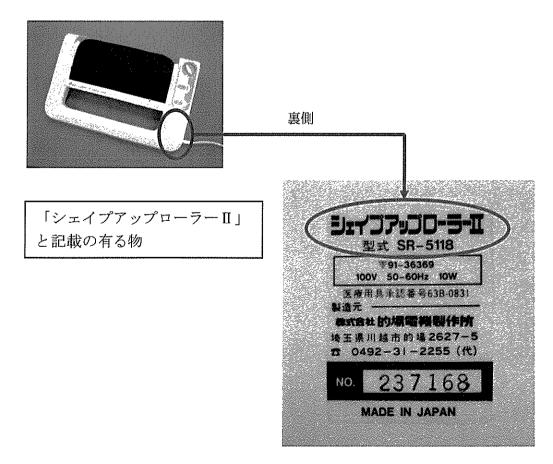


# 添付資料 ②

# アルビシェイプアップローラー取扱い説明書より抜粋

表紙

# プルビシェイプ ア**リプロ**-ラー

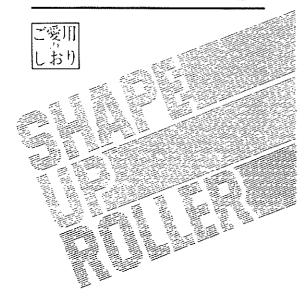

本祭を企しくご使用いたさくだかに、ご使用前に いずごのにおりをお読みください。また お読み にないれたあとも大切に保備してください。


## 使用上のご注意

●安全のためカバーをはずしたままでご 使用にならないでください。また、回 転しているローラーの間に指や物品等 を入れないでください。



使用上の注意より抜粋

仕様・定格

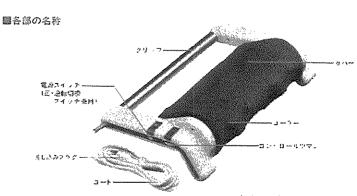

■定格・仕様

Z.	橘	额	.79	4 C 100 V 50 TOH2
ħ	費	電	13	3₩
æ	*%	B3	10) {	30 ↔
ローラーの回転数の コントロール範囲				k)80[e] - Fri 50[i] - 4
ローラーの原動方向				并有国际(Jiè方向)。可绝对
****	********	Q.	. 54.	245%

やなれいため 総任数い変更をするようだわります。

# 添付資料 ③

# シェイプアップローラーⅡ取扱説明書より抜粋

表紙

### 取扱説明書


ご使用前に必ずお読みください。

保加基付

このだびは当共政治をお買上けいただきま して誠にみりびとうございました。 ご使用所は、この取扱決別器をよくごれか のつる。正しぐお望いください。

## 使用上のご注意

●安全のためカバーをはずしたままでご 使用にならないでください。また、回 転しているローラーの間に指や物品等 を入れないでください。

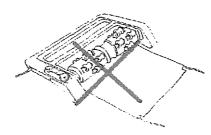

使用上の注意より抜粋

仕様・定格



X 1 タイマーッマン(景電源スイッチ) スタント (高齢式) コントロールクマミ ワイトグリ ・フ 2000年

切換フマミ

#### ■定格・仕様

■各部の名称

- ●電景 学校周序数:160 V 50 60 H: ● 消費電力 10W
- 中心性的制 ●ク(マー帯大時間:10分
- ●ロ ラ の回転器:50H:地区-約45-級回程 分 のコントロール絵画:60H:地区-約37-80回転 分

生しユスマラク

● 燉 短名 \* . -イツア .プローマーJはならSR-51(8) ◆ 第 ■ 3 4 3

●最大寸法 1.444 × 329 × 129 (tra) ●医療国置金数配置点 (638-633)

●型:在2可容易 : ₹91 −35363